

FORA

Fora Care, Full Care



福爾倍康血糖機 教育訓練
血糖管理網頁

點選桌面上血糖管理網頁進入



義大血糖機 QC 使用者管理 使用單位管理 血糖機管理 試片管理 XY折線圖 XY散佈圖 全院品管表 QC-Log Log

義大血糖機管理

Login

username

password

登入

輸入使用者名稱及密碼按登入

按使用者帳號

1.一般人員權限只能上傳QC (一般人員-由單位主管新增帳號)

新增帳號下key入登入帳號/使用者姓名/密碼/新增

2.最高權限能上傳QC及開管理網頁 (單位主管-由醫學檢驗部新增帳號)

新增帳號下key入登入帳號/使用者姓名/密碼/勾選supervisor

3.停用

勾選停用，該人員不能上傳QC也不能開管理網頁 (離職人員或未通過能力試驗)

義大 血糖機 QC	使用者管理	使用單位管理	血糖機管理	試片管理	XY折線圖	XY數佈圖	全院品管表	QC-Log	Log	Tim 您好!	[登出]
-----------	-------	--------	-------	------	-------	-------	-------	--------	-----	---------	------

	登入帳號	使用者姓名	停用	Supervisor	
編輯	andy	andy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	重設密碼
編輯	jane	測試帳號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	重設密碼
編輯	jennifer	測試帳號	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	重設密碼
編輯	kokomo	盧錫聰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	重設密碼
編輯	peter	測試帳號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	重設密碼
編輯	tim	Tim	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	重設密碼

新增帳號

登入帳號:

使用者姓名:

密碼:

停用: Supervisor:

新增

一般人員請勿勾選此二個選項