



醫學檢驗部/檢驗科

# 採檢容器介紹

V20250321



義大醫療財團法人

E-DA HEALTHCARE GROUP

U1



尿液標準化試管(紅蓋尿管)

料號：M3110023

用途：尿液常規檢查

# U2



尿液尖底離心管(白蓋尿管)

料號：M3110063

用途：懷孕試驗

# U3



尿液圓底試管(圓底尿管)

料號：H1310119


用途：尿液、體液檢體之生化項目檢驗

# U4



120mL 無菌盒  
料號：M2830506  
用途：尿液培養

# S1

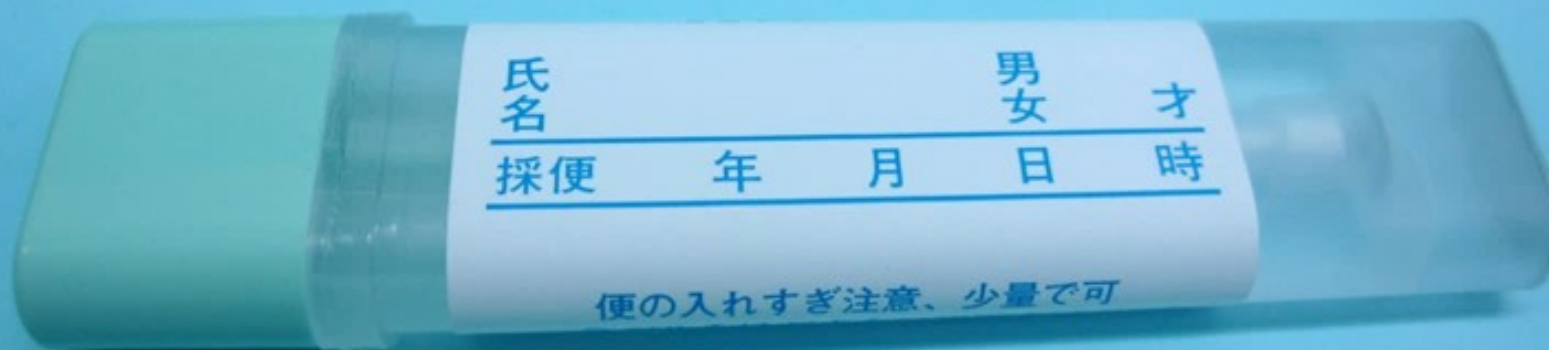

免疫潛血糞便管(免疫OB管)

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：糞便潛血免疫定量法專用

S2



濃縮糞便檢查瓶(糞便濃縮瓶)  
料號：M3110027(請向醫學檢驗部領取)  
用途：寄生蟲檢查濃縮法

S3



糞便檢查瓶  
料號：M3110026  
用途：糞便常規檢查、  
糞便潛血化學法

# S4



糞便培養液杯(俗稱西瓜水)

料號：M4400005

用途：增加沙門氏或志賀氏桿菌分離率(勿用於厭氧培養)



# S5



糞便培養傳送管

料號：L0020510

用途：糞便培養(糞便中需氧菌、Campylobacter、Clostridium difficile培養)

✪TB Culture 糞便檢體請用50mL無菌離心管✪



### 需氧培養傳送管

料號：L0020511

用途：需氧菌培養(藍)- Abscess、Wound/Pus、Throat/Pharynx、  
Vaginal discharge...等微量檢體(糞便除外)



### 需\厭氧培養傳送管(黑頭)

料號：L0020512

用途：適用於Wound及Abscecc檢體需氧及厭氧培養(體液檢體會  
有外漏問題，不建議使用)

❖不適用糞便培養及染色抹片檢查

## 需\厭氧傳送管(紫頭)

料號：L0010972

用途：

1. 體液及Wound檢體類別之需氧及厭氧培養
2. 需氧及厭氧培養同時送可共用一管
3. 不適用於糞便培養
4. 不適用於染色抹片檢查



### 病毒培養傳送管

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：病毒培養(冰浴送檢)

：病毒傳送液  
901病毒培養用  
條件：2C~8C  
日期：20110427  
日期：20110511  
期限：20120427  
人員：楊易靜  
7317123分機

成人血液培養瓶(藍頭\紫頭)

料號：M3610022(需氧)

M3610023(厭氧)

用途：成人血液或骨髓培養

8-10mL/瓶

可氣送



小兒血液培養瓶(銀頭)

料號：M3610026

用途：小兒或採檢不易病人  
血液或骨髓培養  
1-3mL/瓶



結核菌\黴菌血液培養瓶(紅頭)

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：結核菌\黴菌血液或骨髓培養，3-5mL/瓶





## Micro tube(毛細管)

料號：M3201751

用途：嬰兒血型檢驗用毛細管(Capillary tube)，採檢九分滿時，一端以黏土固定放入離心管，患者基本資料張貼於離心管。



**40mL量杯**

料號：M2830224

用途：精液檢查，不可用於  
細菌培養






15mL 無菌離心管(15mL離心管)

料號：M3211515


用途：體液檢查、體液需氧培養

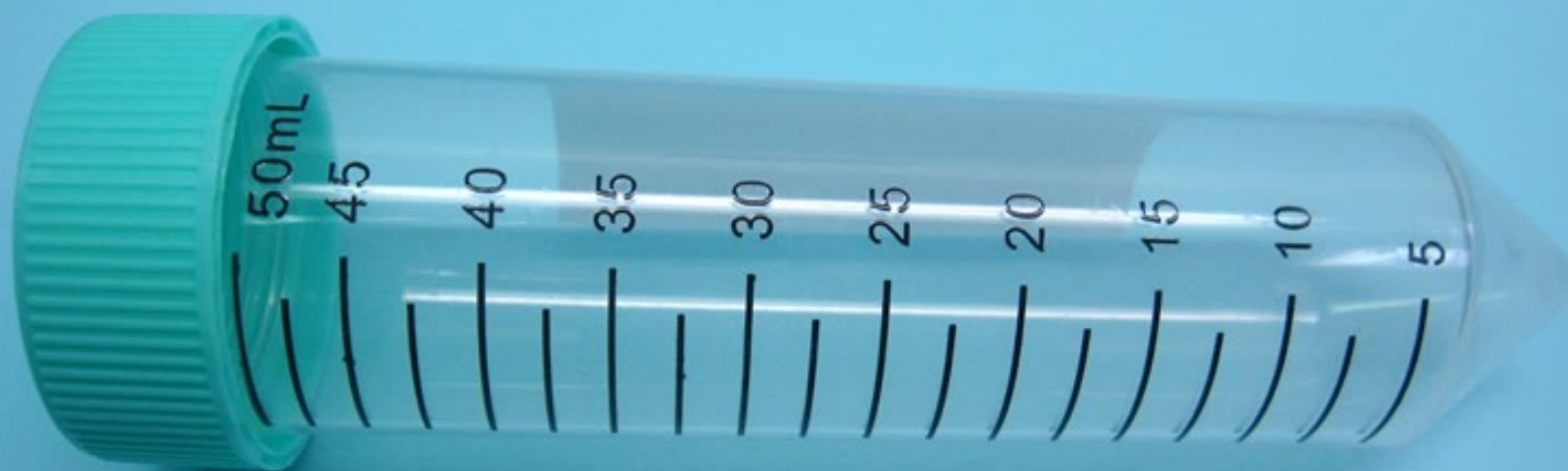

50mL 無菌離心管 (50mL 離心管)

料號：M3211550

用途：大量體液、痰液細菌培養、結核菌培養

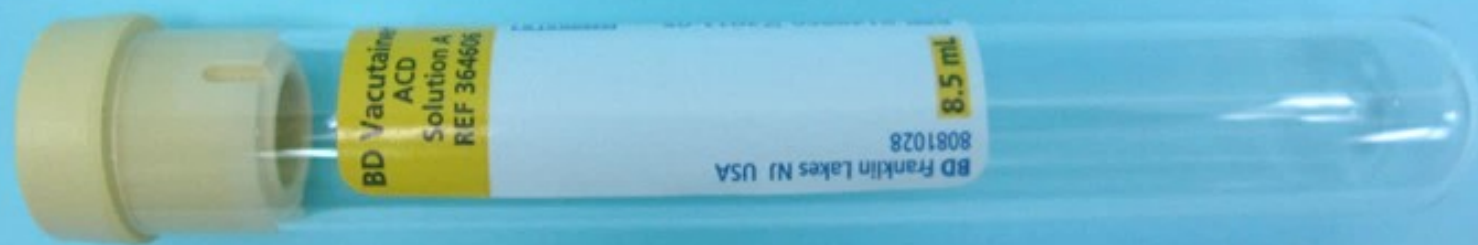

## ACD管

料號：請向醫學檢驗部領取


用途：組織型鑑別檢驗、白血病抗原檢查



## SST黃頭管(SST)

料號：M3110015

用途：一般生化檢查、血清免疫病毒檢查

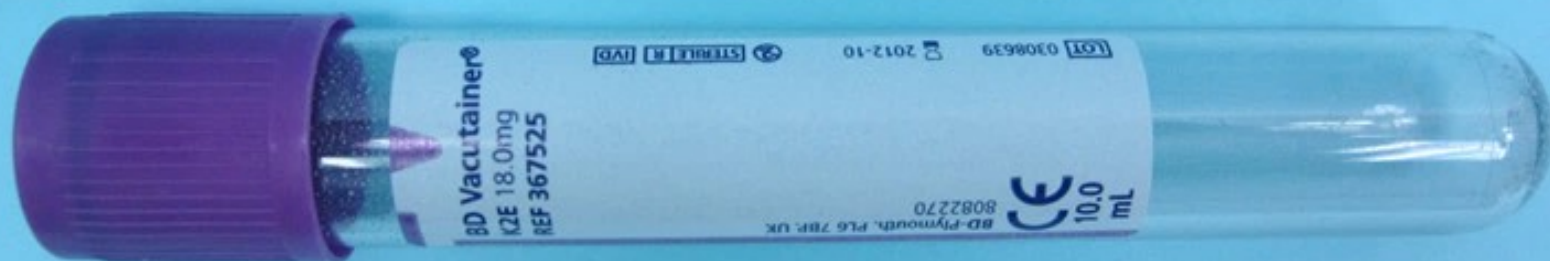

紫頭管 10 mL (大紫頭管)

料號：M3110017

用途：血庫備血檢查



紫頭管3 mL (小紫頭管)

料號：M3110016

用途：血液常規檢查、分子診斷學檢查、重金屬Pb






**綠頭管**

料號：M3110020

用途：緊急生化檢驗、藥物濃度監測、染色體分析

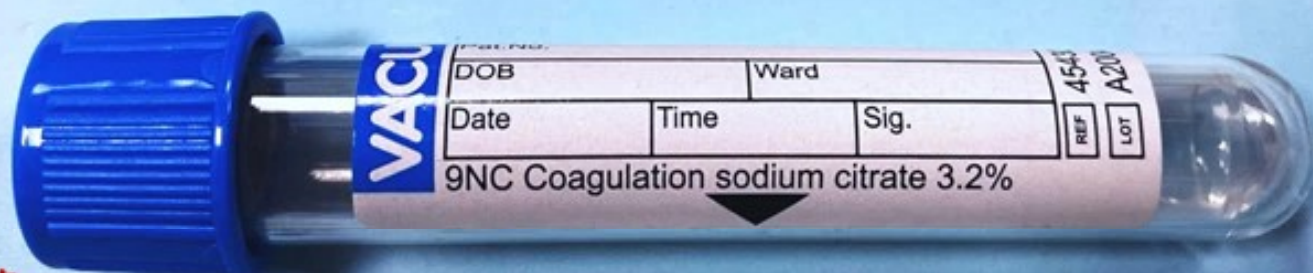

藍頭管

料號：M3110003(2.7mL)、M3110018(2.0mL)


用途：血液凝固學檢查



藍頭紅標管(有貼該金屬專用管標籤)

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：Al、Cr、In檢測

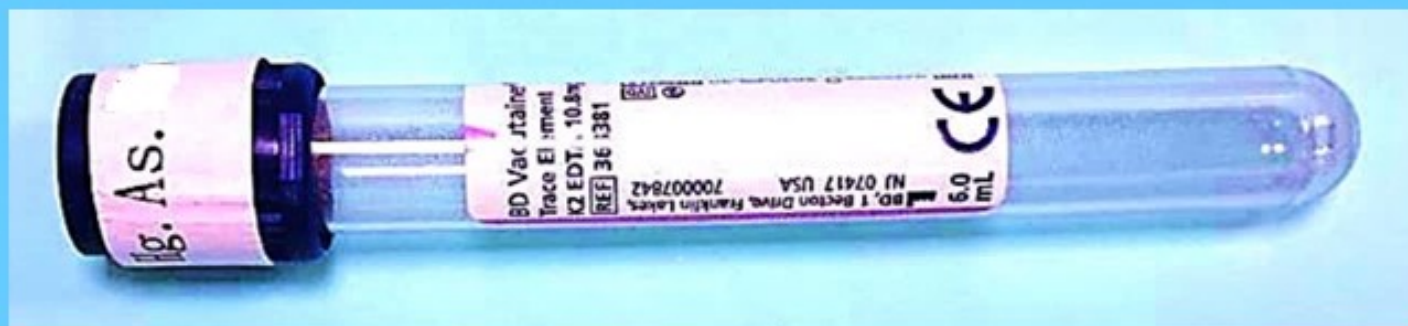

深藍頭紫標管(有貼該金屬專用管標籤)

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：重金屬(Hg, As...)檢測



灰頭管

料號：M3110019

用途：血糖、乳酸測定

綠頭      灰頭      綠頭      黃頭      紫頭  
heparin   Nil      TB1      TB2      Mitrogen  
                 Control      Antigen      Antigen      Control



## Quantiferon-TB plus 專用採檢管

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：診斷潛伏性結核菌感染

注意事項

星期一到星期五16:00前收件。

真空採檢順序：1綠頭→2灰頭Nil→綠頭TB1→黃頭TB2→紫頭Mitogen


採檢量：第1管的綠頭沒有採檢量限制，第2~5管每管各1mL。

採檢後須立即送檢，檢體勿冷藏，勿離心!!!

# 病毒傳送管



料號：L0020506

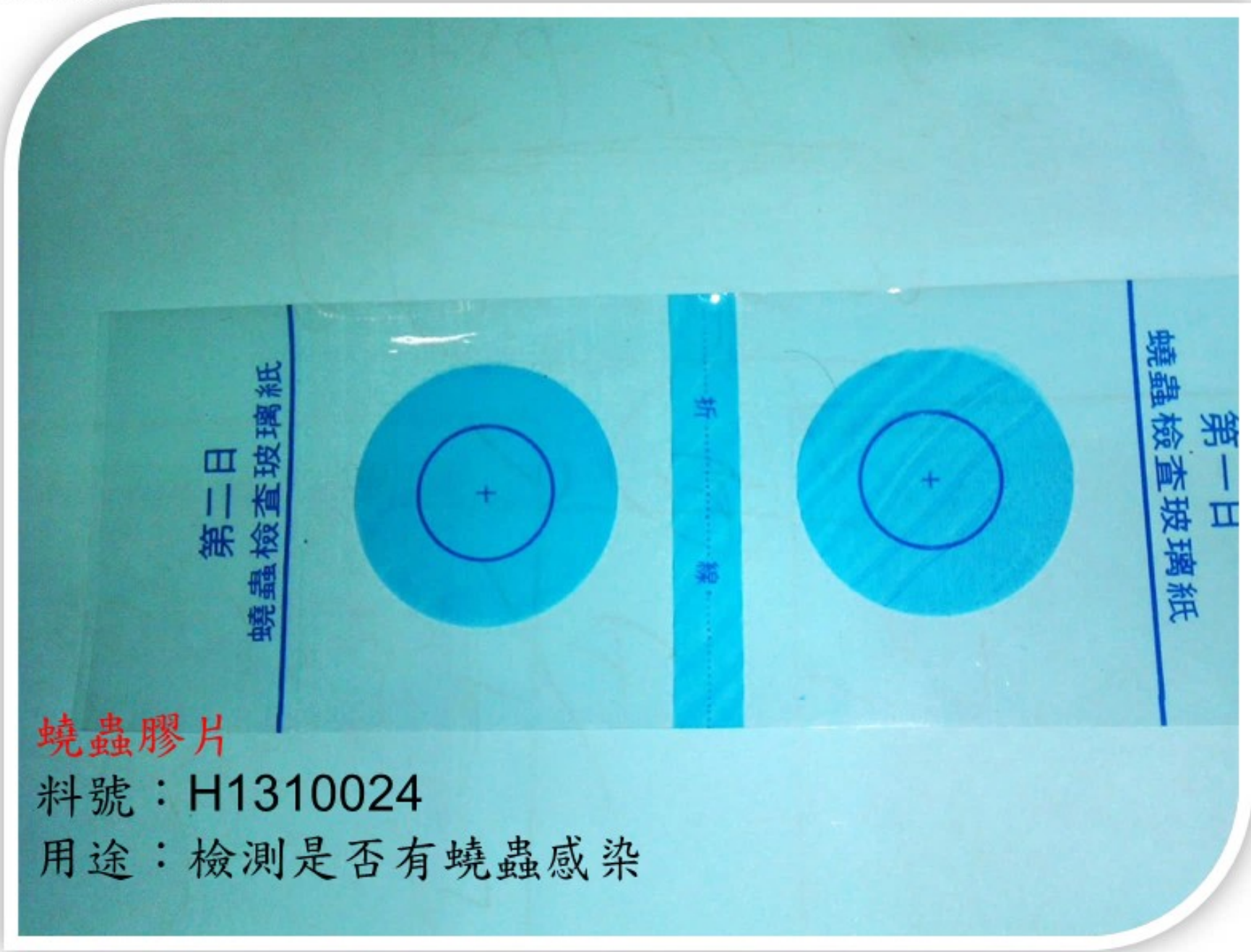

蟯蟲膠片

料號：H1310024

用途：檢測是否有蟯蟲感染





Thank You !



義大醫療財團法人  
E-DA HEALTHCARE GROUP