



醫學檢驗部/檢驗科

採檢容器介紹

V20250604



義大醫療財團法人
E-DA HEALTHCARE GROUP

U1



尿液標準化試管(紅蓋尿管)

料號：M3110023

用途：尿液常規檢查

U2



尿液尖底離心管(白蓋尿管)

料號：M3110063

用途：懷孕試驗

U3



尿液圓底試管(圓底尿管)

料號：H1310119

用途：尿液、體液檢體之生化項目檢驗




U4



120mL 無菌盒
料號：M2830506
用途：尿液培養

S1

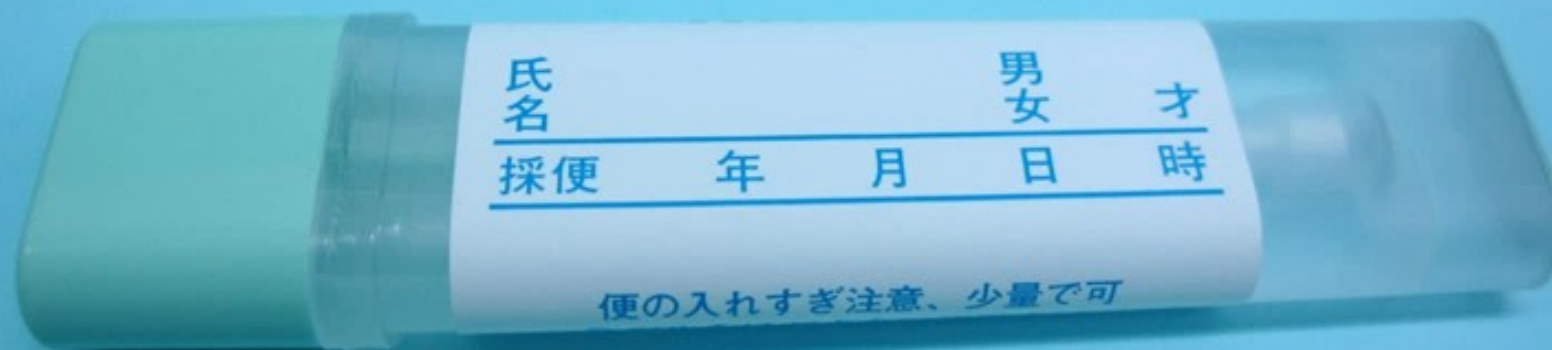

免疫潛血糞便管(免疫OB管)

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：糞便潛血免疫定量法專用

S2



濃縮糞便檢查瓶(糞便濃縮瓶)

料號：M3110027(請向醫學檢驗部領取)

用途：寄生蟲檢查濃縮法

S3



糞便檢查瓶

料號：M3110026

用途：糞便常規檢查、
糞便潛血化學法

S4



糞便培養液杯(俗稱西瓜水)

料號：M4400005

用途：增加沙門氏或志賀氏桿菌分離率(勿用於厭氧培養)

S5



糞便培養傳送管

料號：L0020510

用途：糞便培養(糞便中需氧菌、Campylobacter、Clostridium difficile培養)


★TB Culture 糞便檢體請用50mL無菌離心管★



需氧培養傳送管

料號：L0020511

用途：需氧菌培養(藍)- Abscess、Wound/Pus、Throat/Pharynx、
Vaginal discharge...等微量檢體(糞便除外)

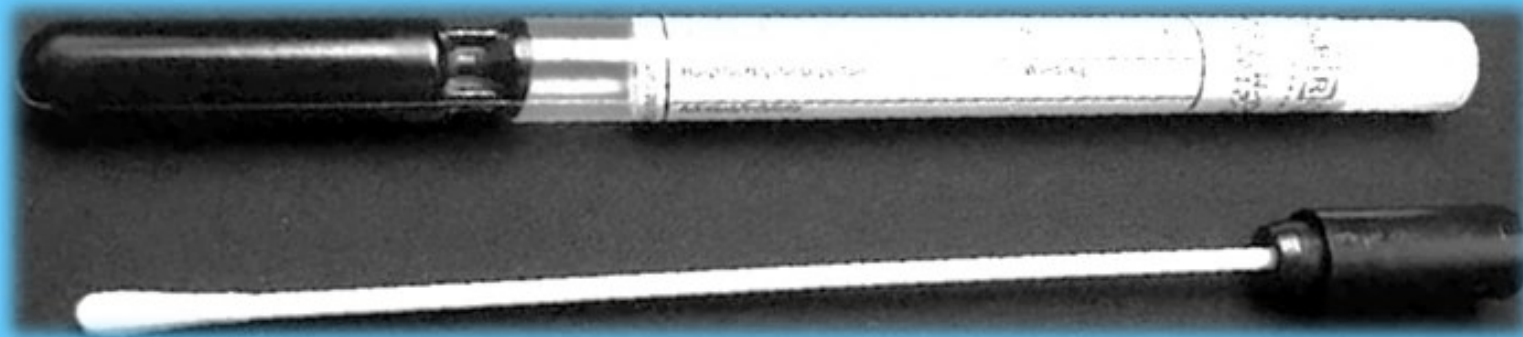

需\厭氧培養傳送管(黑頭)

料號：L0020512

用途：適用於Wound及Abscecc檢體需氧及厭氧培養(體液檢體會
有外漏問題，不建議使用)

✳不適用糞便培養及染色抹片檢查

需\厭氧傳送管(紫頭)

料號：L0010972

用途：

1. 體液及Wound檢體類別之
需氧及厭氧培養
2. 需氧及厭氧培養同時送可
共用一管
3. 不適用於糞便培養
4. 不適用於染色抹片檢查





病毒培養傳送管

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：病毒培養(冰浴送檢)

成人血液培養瓶(藍頭\紫頭)

料號：M3610022(需氧)

M3610023(厭氧)

用途：成人血液或骨髓培養

8-10mL/瓶

可氣送



小兒血液培養瓶(銀頭)

料號：M3610026

用途：小兒或採檢不易病人
血液或骨髓培養
1-3mL/瓶



結核菌\黴菌血液培養瓶(紅頭)

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：結核菌\黴菌血液或骨髓培養， 3-5mL/瓶



Micro tube(毛細管)

料號：M3201751

用途：嬰兒血型檢驗用毛細管(Capillary tube)，採檢九分滿時，一端以黏土固定放入離心管，患者基本資料張貼於離心管。



40mL 量杯

料號：M2830224

用途：精液檢查，不可用於
細菌培養






15mL 無菌離心管(15mL離心管)

料號：M3211515


用途：體液檢查、體液需氧培養

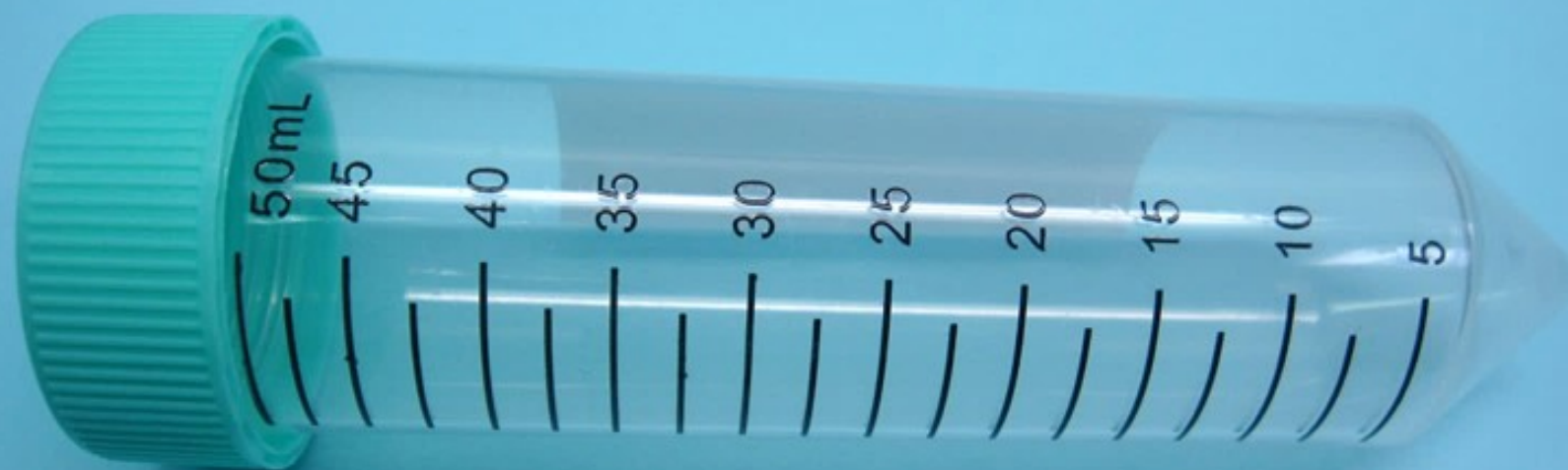

50mL 無菌離心管(50mL離心管)

料號：M3211550


用途：大量體液、痰液細菌培養、結核菌培養

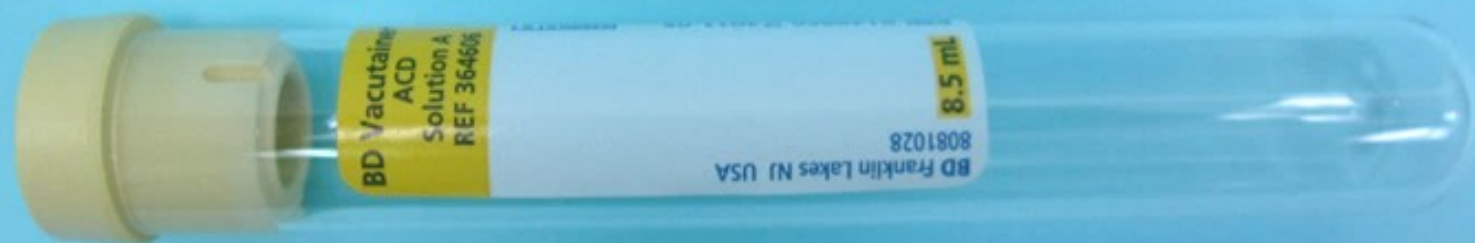

ACD管

料號：請向醫學檢驗部領取


用途：組織型鑑別檢驗、白血病抗原檢查

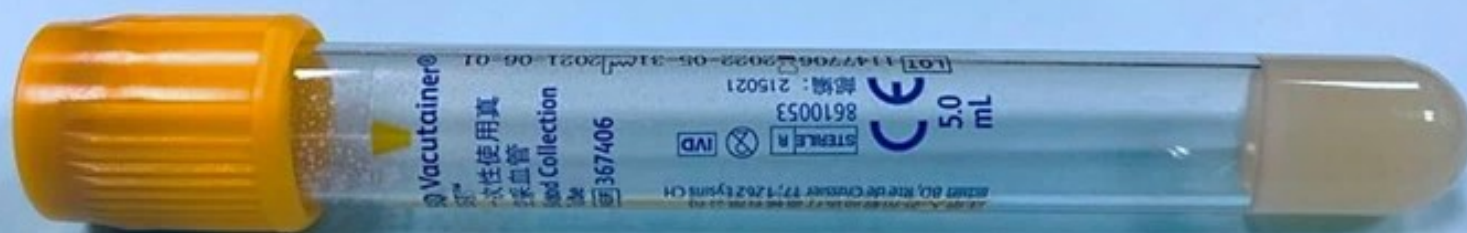

SST黃頭管(SST)

料號：M3110015


用途：一般生化檢查、血清免疫病毒檢查

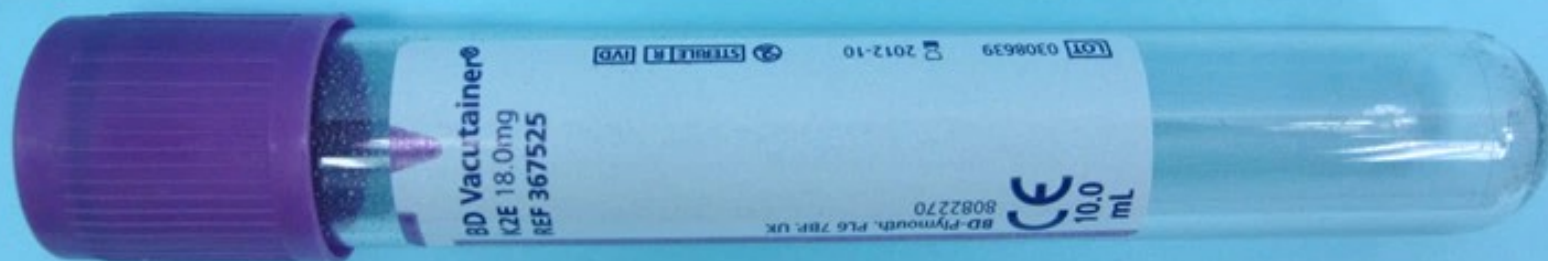

紫頭管 10 mL(大紫頭管)

料號：M3110017

用途：血庫備血檢查

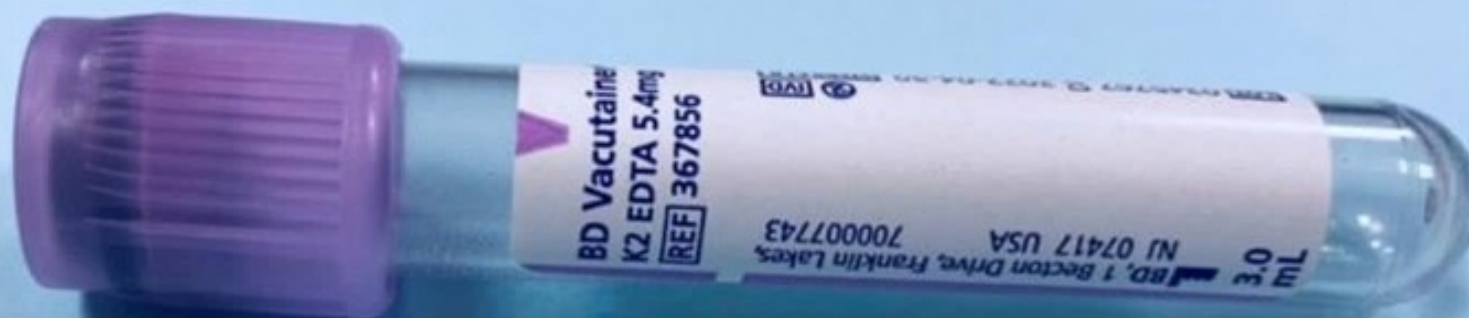

紫頭管3 mL (小紫頭管)

料號：M3110016

用途：血液常規檢查、分子診斷學檢查、重金屬Pb



綠頭管

料號：M3110020

用途：緊急生化檢驗、藥物濃度監測、染色體分析



藍頭管

料號：M3110003(2.7mL)、M3110018(1.8mL)


用途：血液凝固學檢查



藍頭紅標管(有貼該金屬專用管標籤)

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：Al、Cr、In檢測

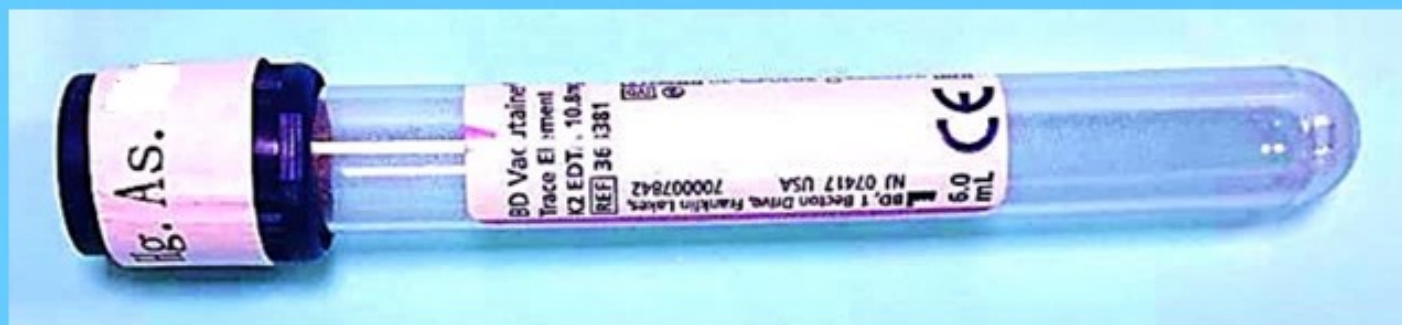

深藍頭紫標管(有貼該金屬專用管標籤)

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：重金屬(Hg, As...)檢測




灰頭管

料號：M3110019

用途：血糖、乳酸測定

綠頭	灰頭	綠頭	黃頭	紫頭
Heparin	Nil	TB1	TB2	Mitrogen
備用	Control	Antigen	Antigen	Control

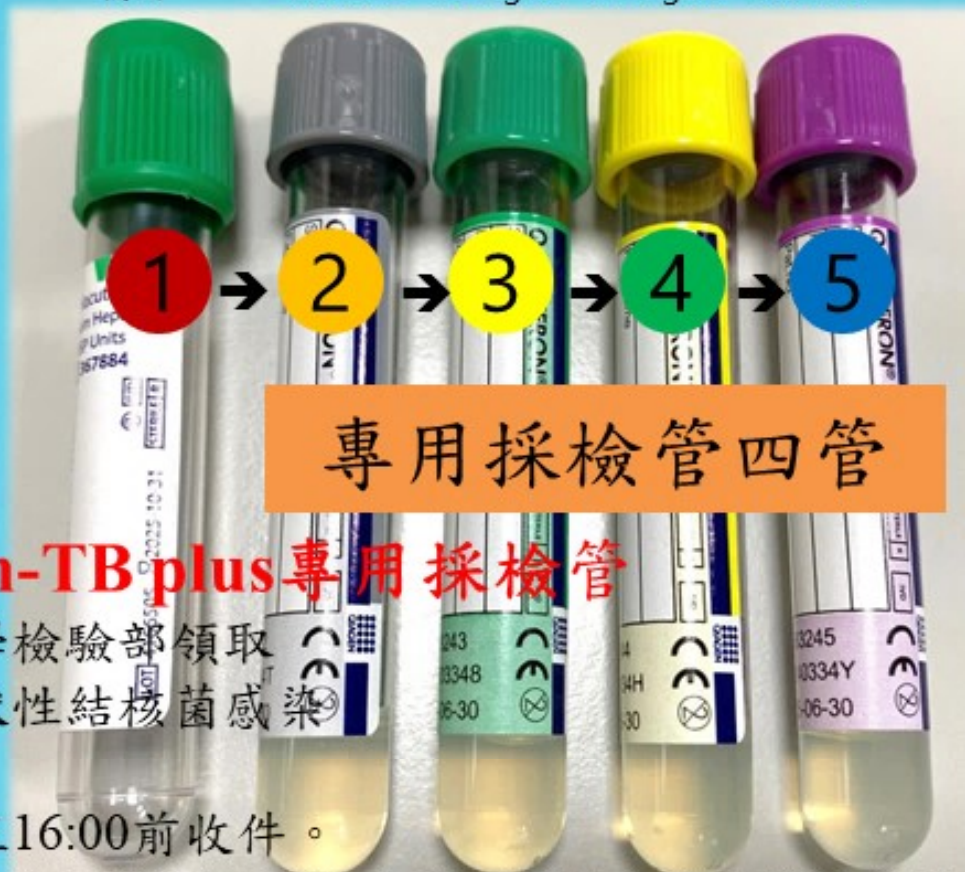

專用採檢管四管

Quantiferon-TB plus 專用採檢管

料號：請向醫學檢驗部領取

用途：診斷潛伏性結核菌感染

注意事項

星期一到星期五16:00前收件。

真空採檢順序：1綠頭→2灰頭Nil→綠頭TB1→黃頭TB2→紫頭Mitrogen


採檢量：第1管的綠頭沒有採檢量限制，第2~5管每管各1mL。

採檢後須立即送檢，檢體勿冷藏，勿離心!!!

病毒傳送管



料號：L0020506

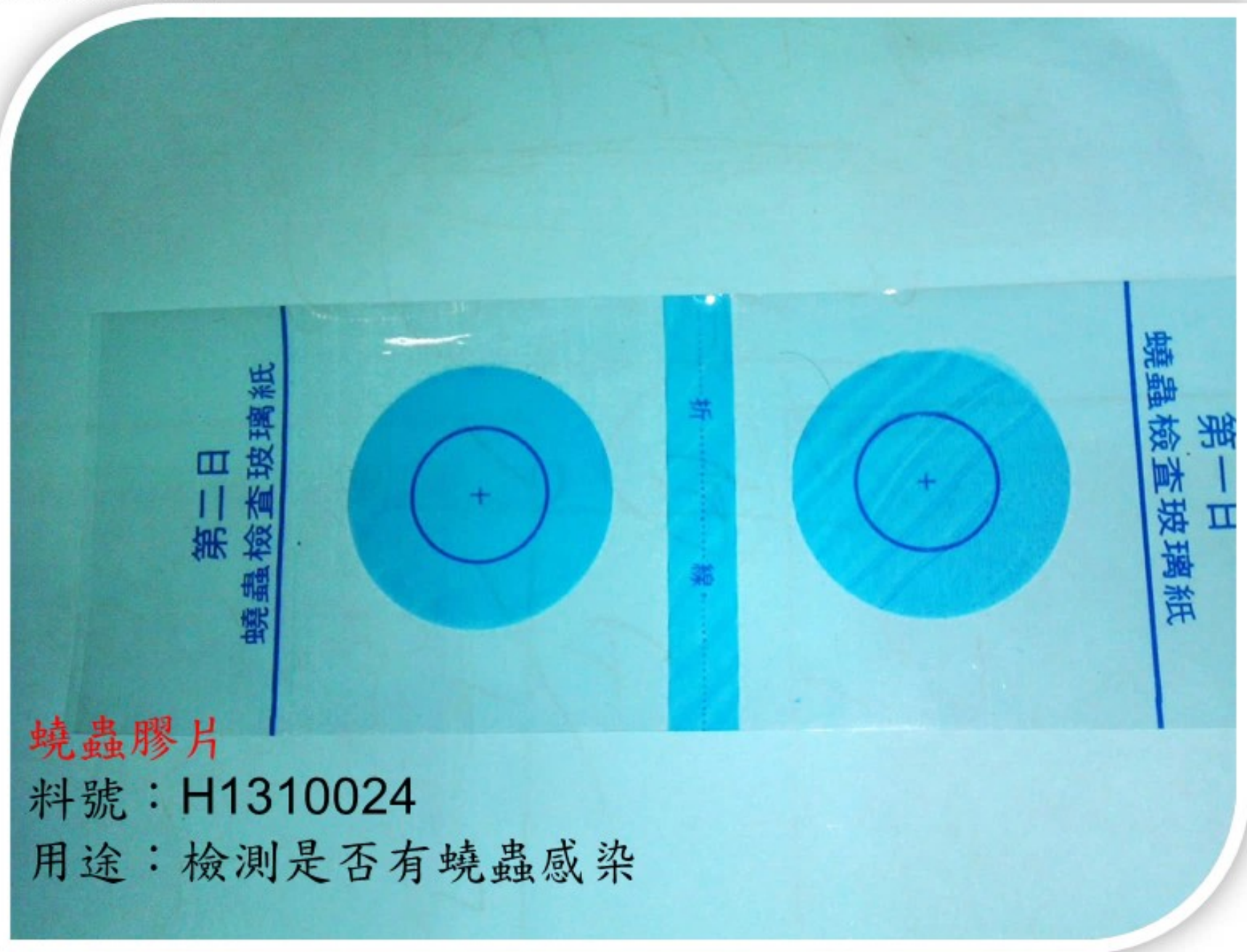

蟯蟲膠片

料號：H1310024

用途：檢測是否有蟯蟲感染



Thank You !



義大醫療財團法人
E-DA HEALTHCARE GROUP