


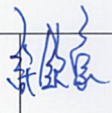

義大醫療 2024 年 06 月份床邊檢驗血糖機品管評估結果說明
(機型:FORD S10)

(試片批號: TD23C120-BED、TD23I115-BDD)

1. 各單位機台品管操作次數及執行成功率請詳見後表所示。
2. 全院血糖試片品管統計圖表、平均值(Mean)、標準差(SD)、變異係數(CV)請詳見後表所示。
3. 6 月份所有單位確實執行血糖機品管，品管執行成功率皆>90%。
4. 本月份統計單位共有 **66** 個，評估結果經審核後上傳，相關教育訓練及品管執行注意事項請逕行參閱醫學檢驗部網頁，網址為 <http://exdep.edah.org.tw/cp/>。

部長		技術主任	 	審核人員	
----	---	------	---	------	---

全院品管統計表

查詢日期區間：2024/06/01 ~ 2024/06/30

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000001	化療中心	22	22	0	100.00	0.00
2	A0000002	日間病房	8	8	0	100.00	0.00
3	A0000004	居家護理	70	70	0	100.00	0.00
4	A0000006	美容中心	13	13	0	100.00	0.00
5	A0000008	家醫科(偏鄉)	4	4	0	100.00	0.00
6	A0000009	家醫科居家訪視	10	10	0	100.00	0.00
7	A0000010	核醫科	19	19	0	100.00	0.00
8	A0000011	健診	24	24	0	100.00	0.00
9	A0000012	產房	19	18	1	94.74	5.26
10	A0000013	麻醉科	50	47	3	94.00	6.00
11	A0000017	職業醫學科	6	6	0	100.00	0.00
12	A000005A	5A病房	6	6	0	100.00	0.00
13	A000005B	5B病房	31	31	0	100.00	0.00
14	A000006A	6A病房	61	61	0	100.00	0.00
15	A000006B	6B病房	62	61	1	98.39	1.61
16	A000007A	7A病房	61	60	1	98.36	1.64
17	A000007B	7B病房	60	60	0	100.00	0.00
18	A000008A	8A病房	61	60	1	98.36	1.64
19	A000008B	8B病房	61	60	1	98.36	1.64
20	A000009A	9A病房	60	60	0	100.00	0.00
21	A000009B	9B病房	60	59	1	98.33	1.67
22	A00000ER	急診	197	178	19	90.36	9.64
23	A000010A	10A病房	60	60	0	100.00	0.00
24	A000011A	11A病房	62	60	2	96.77	3.23
25	A000011B	11B病房	60	60	0	100.00	0.00
26	A000012B	12B病房	93	90	3	96.77	3.23
27	A000013A	13A病房	94	90	4	95.74	4.26
28	A000013B	13B病房	60	59	1	98.33	1.67
29	A0000CCU	CCU	32	30	2	93.75	6.25
30	A0000CCU1	CCU隔離病房	32	31	1	96.88	3.13

全院品管統計表

查詢日期區間：2024/06/01 ~ 2024/06/30

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
31	A0000HDR	HDR	67	64	3	95.52	4.48
32	A0000IMU	IMU	33	32	1	96.97	3.03
33	A0000RCC	RCC	52	52	0	100.00	0.00
34	A000MICU	MICU	60	60	0	100.00	0.00
35	A000OPD1	門診	162	161	1	99.38	0.62
36	A000OPD4	門診-神內1	18	18	0	100.00	0.00
37	A000PICU	PICU	88	88	0	100.00	0.00
38	A00NSICU	NSICU	60	60	0	100.00	0.00
39	A00SICU1	SICU	31	31	0	100.00	0.00
40	A00SICU2	SICU-2	60	60	0	100.00	0.00
總計			2,089	2,043	46	97.80	2.20

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

全院品管統計表

查詢日期區間：2024/06/01 ~ 2024/06/30

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	C0000002	癌-高壓氧中心	13	12	1	92.31	7.69
2	C0000003	癌-透析室	22	21	1	95.45	4.55
3	C0000006	癌-護理之家	82	80	2	97.56	2.44
4	C000005C	癌-5C	33	30	3	90.91	9.09
5	C000005D	癌-5D	31	30	1	96.77	3.23
6	C000006C1	癌-6C	62	60	2	96.77	3.23
7	C000006D	癌-6D	64	60	4	93.75	6.25
8	C000007C	癌-7C	61	60	1	98.36	1.64
9	C000007D	癌-7D	60	60	0	100.00	0.00
10	C000008C	癌-8C	60	60	0	100.00	0.00
11	C000008D	癌-8D	60	60	0	100.00	0.00
12	C00000ER	癌-急診	59	59	0	100.00	0.00
13	C0000PD1	癌-門診	95	93	2	97.89	2.11
14	C003LICU1	癌-3LICU	60	60	0	100.00	0.00
15	D0000001	大昌-麻醉科	3	3	0	100.00	0.00
16	D0000002	大昌-糖尿病衛教室	13	13	0	100.00	0.00
17	D0000003	大昌-嬰兒室	28	28	0	100.00	0.00
18	D0000010H	大昌-10H	29	29	0	100.00	0.00
19	D000005G	大昌-5G	30	30	0	100.00	0.00
20	D000006G	大昌-6G	60	60	0	100.00	0.00
21	D000008J	大昌-8J	30	30	0	100.00	0.00
22	D000009H	大昌-9H	33	30	3	90.91	9.09
23	D00000ER	大昌-急診	56	56	0	100.00	0.00
24	D0000HDR	大昌-HDR	24	24	0	100.00	0.00
25	D0000IMU	大昌-IMU	29	29	0	100.00	0.00
26	D0000PD1	大昌-門診	73	73	0	100.00	0.00
總計			1,170	1,150	20	98.29	1.71

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除


(義大)

列印時間 : 2024/07/10 16:04


試片品管統計圖表

查詢年月 : 2024/06

批號試片碼 : TD23C120-BED

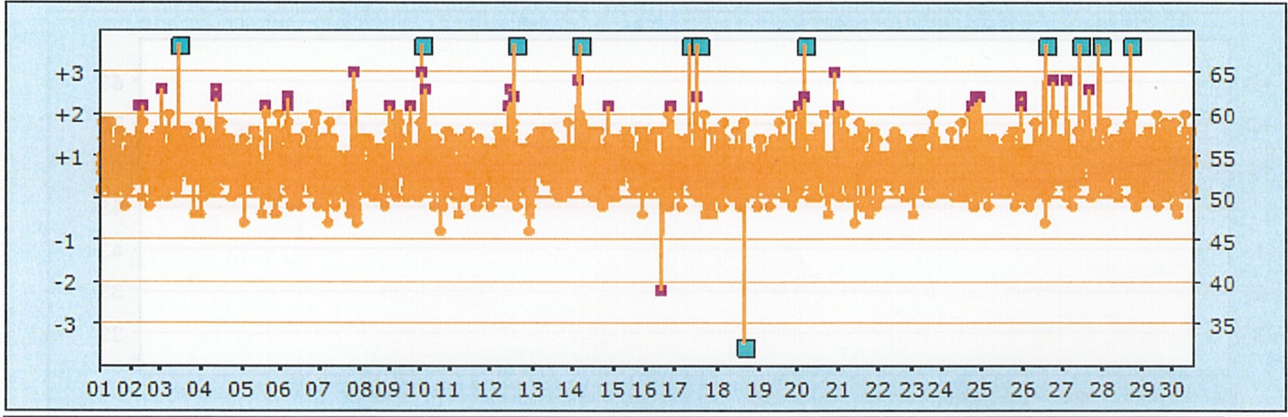

Level1			
Lot Num :		TD23C120-BED	
N=		2072	
		Record	Target
Mean :		54.19	50
SD :		10.07	5
CV% :		18.58	
Bias(%) :		8.38	
Low :		20	High : 492

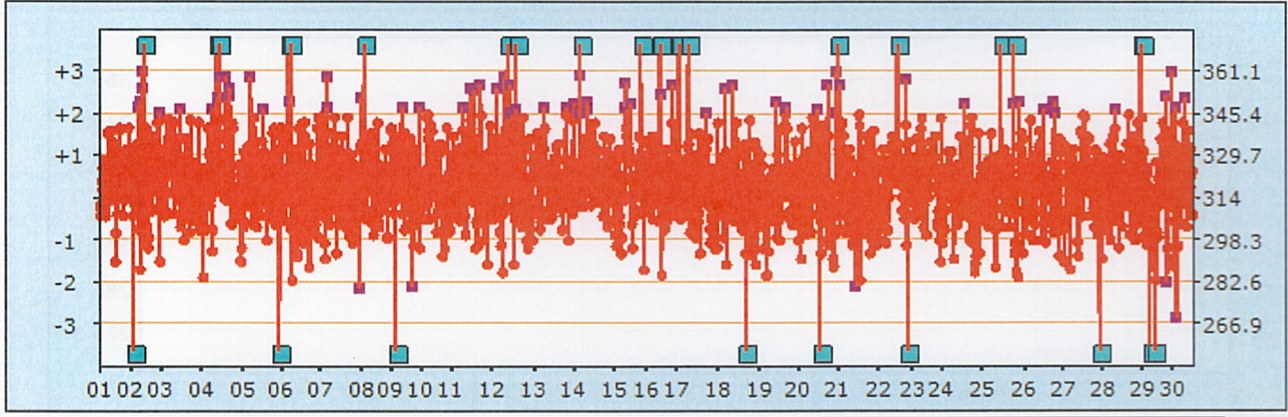


Level3			
Lot Num :		TD23C120-BED	
N=		2054	
		Record	Target
Mean :		319.09	314
SD :		18.8	15.7
CV% :		5.89	
Bias(%) :		1.62	
Low :		3	High : 427

列印時間：2024/07/10 16:04


試片品管統計圖表

查詢年月：2024/06

批號試片碼：TD23I115-BDD

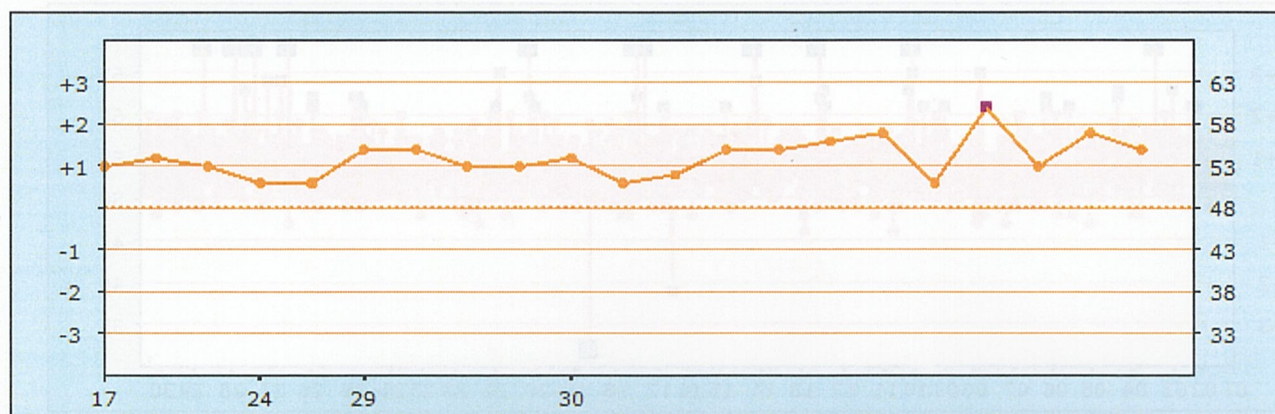

Level1			
Lot Num :	TD23I115-BDD		
N=	21		
	Record	Target	
Mean :	54	48	
SD :	2.32	5	
CV% :	4.3		
Bias(%) :	12.5		
Low :	51	High :	60

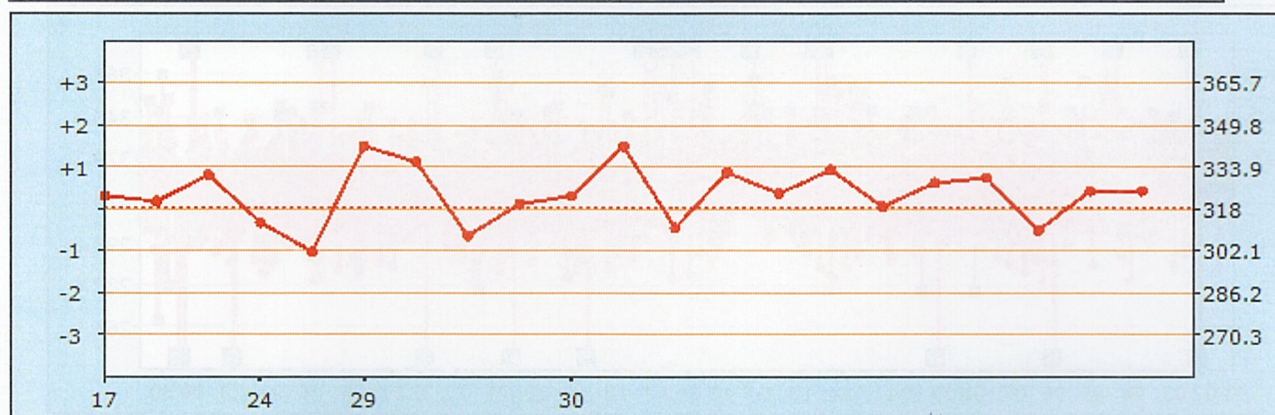


Level3			
Lot Num :	TD23I115-BDD		
N=	21		
	Record	Target	
Mean :	323.71	318	
SD :	10.76	15.9	
CV% :	3.32		
Bias(%) :	1.8		
Low :	302	High :	342

(癌胚、大腸)
試片品管統計圖表


列印時間：2024/07/10 16:07

查詢年月：2024/06

批號試片碼：TD23C120-BED

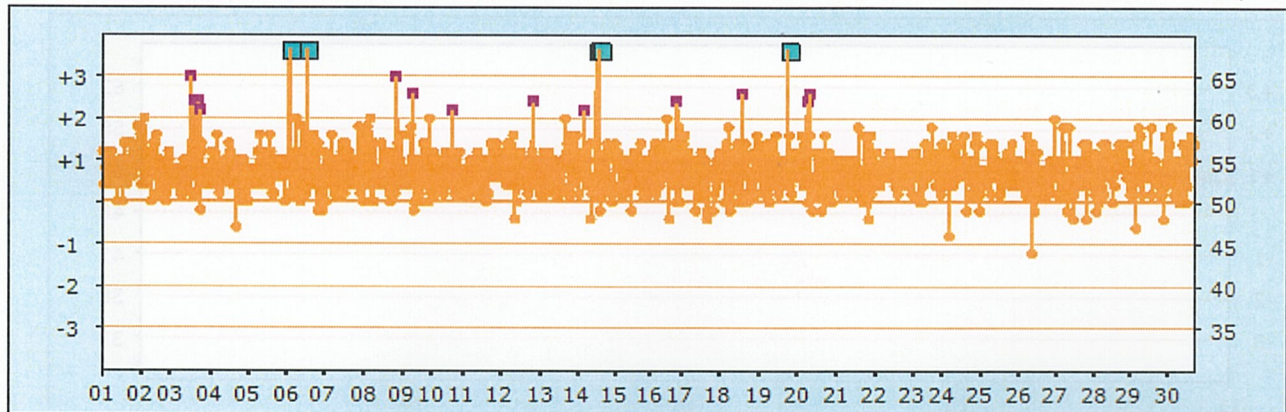

Level1			
Lot Num :	TD23C120-BED		
N=	1166		
	Record	Target	
Mean :	54.45	50	
SD :	13.9	5	
CV% :	25.53		
Bias(%) :	8.9		
Low :	0	High :	329

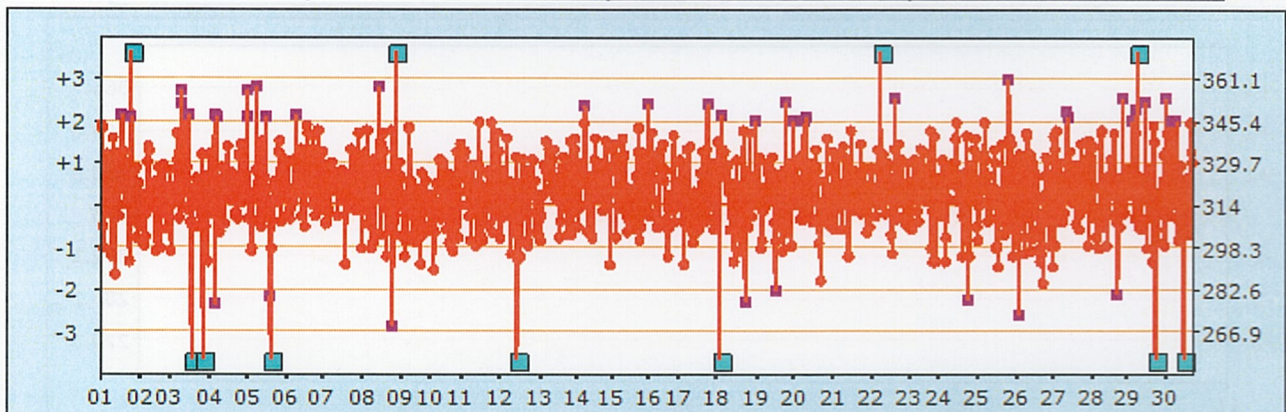


Level3			
Lot Num :	TD23C120-BED		
N=	1158		
	Record	Target	
Mean :	317.86	314	
SD :	23.35	15.7	
CV% :	7.35		
Bias(%) :	1.23		
Low :	0	High :	373

列印時間：2024/07/10 16:07


試片品管統計圖表

查詢年月：2024/06

批號試片碼：TD23I115-BDD

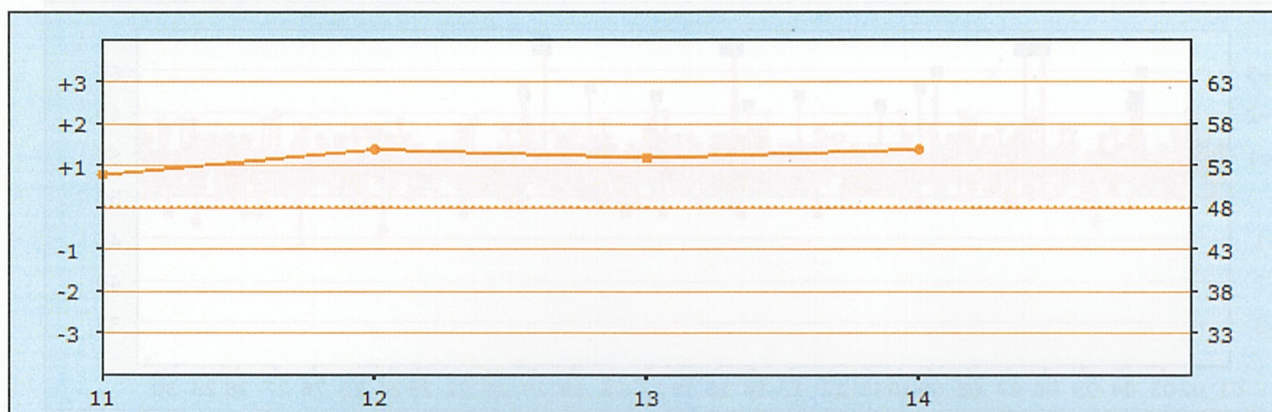

Level1			
Lot Num :	TD23I115-BDD		
N=	4		
	Record	Target	
Mean :	54	48	
SD :	1.41	5	
CV% :	2.61		
Bias(%) :	12.5		
Low :	52	High :	55

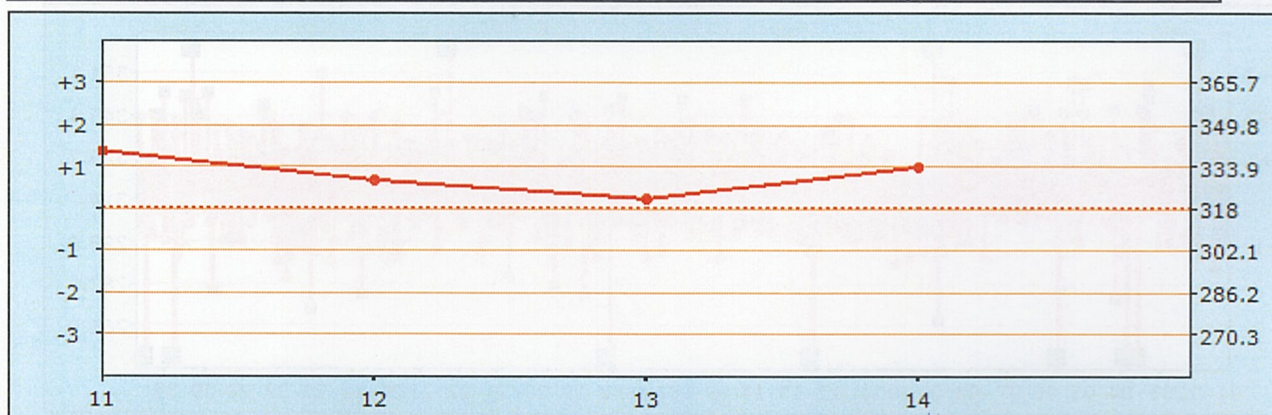

Level3			
Lot Num :	TD23I115-BDD		
N=	4		
	Record	Target	
Mean :	331.25	318	
SD :	7.63	15.9	
CV% :	2.3		
Bias(%) :	4.17		
Low :	322	High :	340