

FORA

Fora Care, Full Care



福爾倍康血糖機 教育訓練
血糖機QC操作

品管液注意事項

- 品管液請保存在室溫 $2^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，請勿冷藏。
- 品管液開瓶後90天有效，首次開瓶日請登記於品管液標籤上，過期請丟棄。
- 避免品管液瓶口沾到其他雜質或灰塵，使用後，請以乾淨紙巾清潔瓶口，後再鎖緊瓶蓋。
- 使用前請搖均並將第一滴品管液滴掉再做QC測試。

品管液測試

品管液內含定量葡萄糖，用來檢視機器和試片之間的運作是否正常，以及操作是否正確。當您遇到下列情況時，建議使用品管液測試，再開始進行血糖測試。

- 一日一次例行性測試。
- 當您感覺檢測結果與病患的身體狀況不同，或懷疑測試結果不正確時。
- 當機器掉落或遭受外力撞擊時。

血糖機QC操作

- 24H內QC（血糖機內部設定以日為單位，當日初用血糖機即需作QC）
- 超過24H未進行QC—無法測量血糖，強制QC
- 上傳QC資料至Server

超過24H未進行QC—強制QC




插入血糖試片出現"E-9"再跳至L1強制QC



出現"L1"及左下角現"QC"字樣



搖均低值品管液(黃蓋)將第一滴滴掉，再將低值品管液(黃蓋)滴在拆封的試紙鋁箔包裝上面，取一試片吸入口管液聽到嗶聲移開

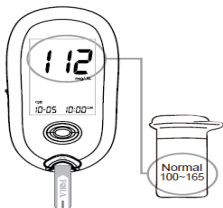

測量所得結果落於試片瓶上所印的Y1容許範圍。退片進入L2


超過24H未進行QC—強制QC



插入血糖試片出現”L2”及左下角現”QC”字樣



搖均高值品管液(藍蓋)將第一滴滴掉，再將高值品管液(藍蓋)滴在拆封的試紙鋁箔包裝上面，取一試片吸入口管液聽到嗶聲移開

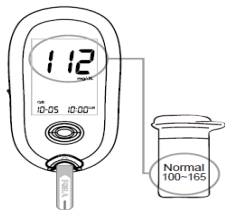

測量所得結果落於試片瓶上所印的B3容許範圍。退片自動關機

24H內QC

低值品管液L1(Y1)測試步驟
(黃色瓶蓋)




插入血糖試片，按一下前方M按鍵出現”L1”及左下角現”QC”字樣



搖均低值品管液(黃蓋)將第一滴滴掉，再將低值品管液(黃蓋)滴在拆封的試紙鋁箔包裝上面，取一試片吸入口管液聽到嗶聲移開



測量所得結果落於試片瓶上所印的Y1容許範圍。退片進入L2

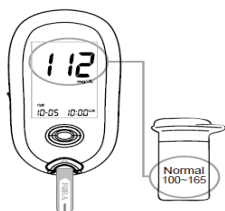

24H內QC


高值品管液L2(B3)測試步驟
(藍色瓶蓋)



插入血糖試片出現”L2”及左下角現”QC”字樣



搖均高值品管液(藍蓋)將第一滴滴掉，再將高值品管液(藍蓋)滴在拆封的試紙鋁箔包裝上面，取一試片吸入口管液聽到嗶聲移開

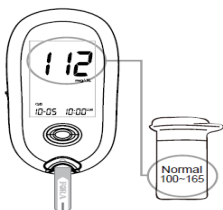

測量所得結果落於試片瓶上所印的B3容許範圍。退片自動關機


上傳血糖機QC資料至Server




將USB傳輸線連接至電腦及血糖機



開啟桌上的血糖機品管軟體

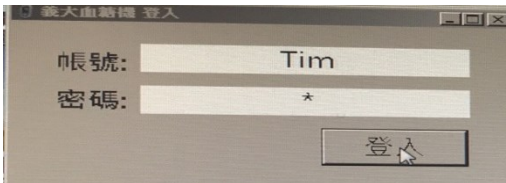

輸入帳號密碼-按換入鍵

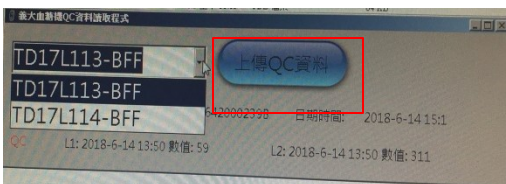

選擇試片批號，待L1及L2數值出來按”**上傳QC資料鍵**”即完成